

SELF-TEST

2 TESTES
PRUEBAS
TESTS

Fast COVID-19 IgM / IgG Antibody
Detection Kit (Colloidal Gold)

SELF-TEST

CE 2854




INDICAÇÃO:

- Se teve contato com alguém que tenha testado positivo de Covid-19!
- Se apresenta ter sintomas de Covid-19!
- Se teve Covid-19 (até há cerca de 3 meses)!
- Se já foi vacinado (e quer saber se houve resposta imunitária positiva)!


VANTAGENS:

- Certificação CE 2854 como SELF-TEST.
- Pode ser feito em casa, na fábrica, no escritório, etc.
- Fácil de fazer.
- Fácil leitura e interpretação do resultado.
- Resultado obtido entre 3 a 10 minutos.


COMO FAZER

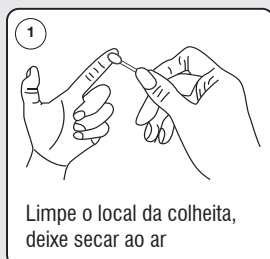


1
Limpe o local da colheita, deixe secar ao ar

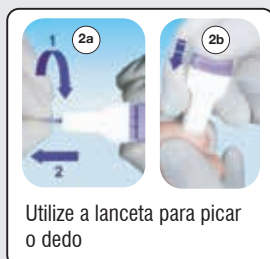


2a 2b
Utilize a lanceta para picar o dedo

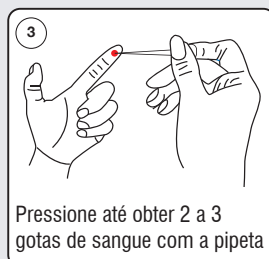


3
Pressione até obter 2 a 3 gotas de sangue com a pipeta

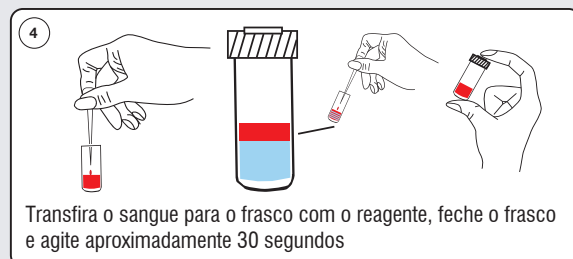

4
Transfira o sangue para o frasco com o reagente, feche o frasco e agite aproximadamente 30 segundos

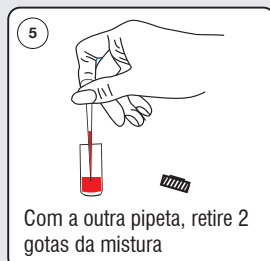


5
Com a outra pipeta, retire 2 gotas da mistura

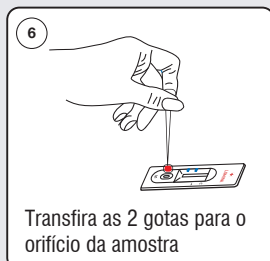

6
Transfira as 2 gotas para o orifício da amostra



7
Limpe o local da colheita, desinfete com um toalhete

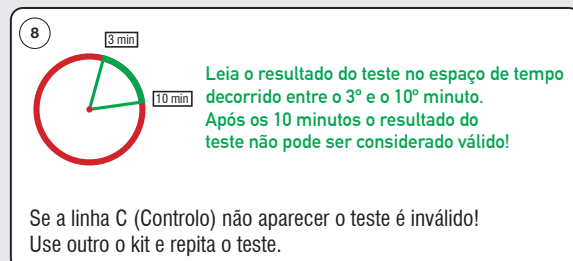

8
Leia o resultado do teste no espaço de tempo decorrido entre o 3º e o 10º minuto. Após os 10 minutos o resultado do teste não pode ser considerado válido!





Se a linha C (Controlo) não aparecer o teste é inválido! Use outro o kit e repita o teste.

COMO LER O RESULTADO


Leia o resultado obtido na membrana e ao 10º minuto tire uma foto à placa de teste. Se necessário amplie a imagem para ver melhor o resultado.

Nota:
A utilização do kit de Autoteste não dispensa a leitura completa das instruções de utilização.

NEGATIVO

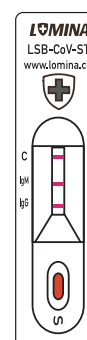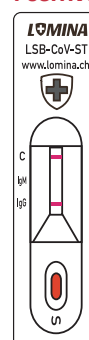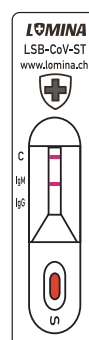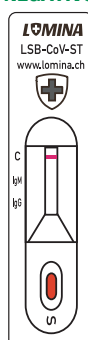

INVÁLIDO

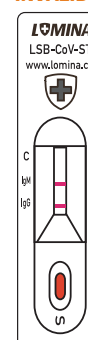

Linha de controlo - C
Linha - IgM
Linha - IgG

Orifício da amostra

Especificidade 97,32%; Sensibilidade 93,54%