

# Teste Serológico - COVID-19

🇵🇹 Detecção da resposta imunológica IgM-IgG ao vírus SARS-CoV-2 (Colloidal gold) - PROFI

🇬🇧 SARS-CoV-2 IgM-IgG Antibody fast detection kit (Colloidal gold) - PROFI

🇪🇸 Detección de la respuesta inmune IgM-IgG al virus SARS-CoV-2 (Colloidal gold) - PROFI

🇵🇹 O Teste Serológico é um teste rápido de uso profissional, não mecanizado, qualitativo e combinado que permite detetar a resposta imunológica aos anticorpos IgM-IgG do vírus SARS-CoV-2 / COVID-19.

🇬🇧 The Serological Test is a rapid test of professional use, non-mechanized, qualitative and combined test that allows the detection of the immune response to the IgM-IgG antibodies of the SARS-CoV-2 / COVID-19 virus.

🇪🇸 La prueba serológica es una prueba rápida de uso profesional, no mecanizada, cualitativa y combinada que permite la detección de la respuesta inmune a los anticuerpos IgM-IgG del virus SARS-CoV-2 / COVID-19.



## 🇵🇹 Instruções (resumo)

Este teste só pode ser realizado em Laboratórios Hospitalares ou outros com biossegurança de nível 2 e em unidades prestadoras de cuidados de saúde registadas na ERS.

Estas indicações não dispensam a leitura das instruções de uso.

## 🇬🇧 Instructions (summary)

This test can be performed by professionals (Hospital, Laboratories, Medicine Clinics).


These instructions do not replace reading the instructions for use.

## 🇪🇸 Instrucciones (resumen)

Esta prueba solo se puede realizar en laboratorios, Hospitales o Clínicas Medicas.

Estas instrucciones no impiden leer las instrucciones de uso.

As imagens são meramente ilustrativas de como fazer o teste / Images are merely illustrative of how to do the test / Las imágenes son meramente ilustrativas de cómo tomar el examen.

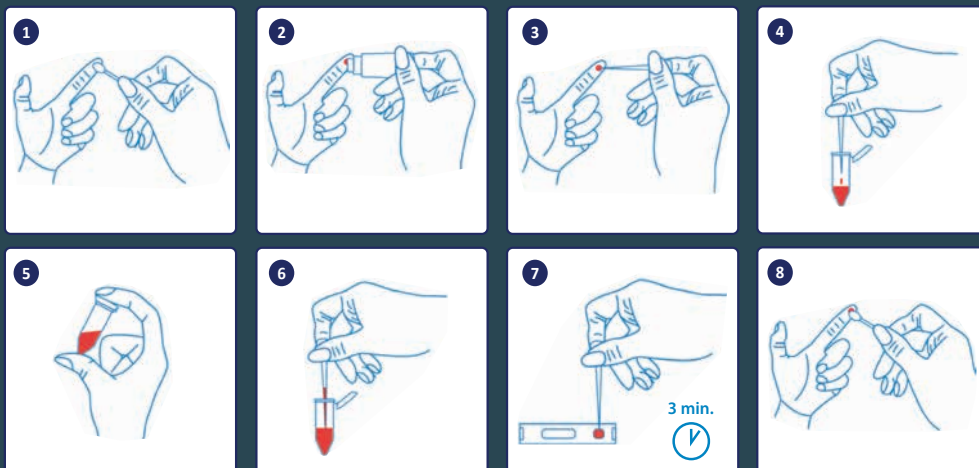

## TESTE NEGATIVO / NEGATIVE TEST / PRUEBA NEGATIVA

Linha de Controlo C visível e as linhas M e G não (nenhum anticorpo foi detetado).  
Line C (Quality Control) visible and lines M and G are not (no antibody has been detected).  
Linea de control C visible y líneas M y G no (no se detectó anticuerpo).

## TESTE POSITIVO / POSITIVE TEST / PRUEBA POSITIVA

Se a linha de controlo C aparecer junto com a linha M, o anticorpo IgM foi detetado, dirija-se ao Atendimento Dedicado ao Covid (ADC) da sua área.


If control line C appears along with line M, the IgM antibody has been detected, go Medical Service in your area.  
Si aparece la línea de control C junto con la línea M, se ha detectado el anticuerpo IgM, ir a un Servicio Médico en su área

Se a linha de controlo C aparecer junto com as linhas G e M, foram detetados anticorpos IgG e IgM.  
If control line C appears along with lines G and M, IgG and IgM antibodies have been detected.  
Si aparece la línea de control C junto con las líneas G y M, se han detectado anticuerpos IgG e IgM.

Se a linha de controlo C aparecer junto com a linha G, o anticorpo IgG foi detetado.  
If control line C appears along with line G, IgG antibodies have been detected.  
Si aparece la línea de control C junto con la línea G, se ha detectado el anticuerpo IgG.

## NOTA / NOTE / NOTA

Neste caso não considere IgG, se aparecer esta linha em baixo é apenas excesso de sangue.  
In this case do not consider IgG, if this line appears below it is just excess blood.  
En este caso, no considere IgG, si esta línea aparece debajo es solo un exceso de sangre.

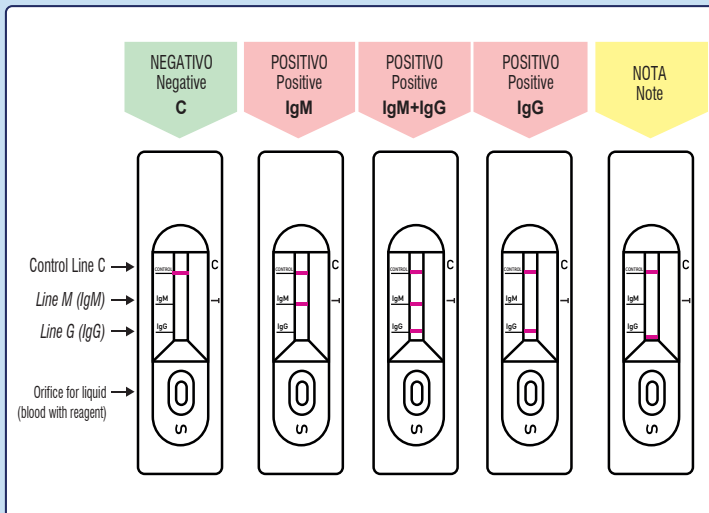

## Interpretação dos resultados

Interpretation of results

Interpretación de resultados

IMPLASYSTEM, Lda - Folheto Informativo Teste Serológico POR / ENG / ESP - Ver. 02.02- 2020

Fabricante | Manufacturer

Representante Exclusivo | Exclusive Representative

geral@testescovid.pt - www.testescovid.pt



implasystem®

T. +351 241 332 606